



Uw hoortoestel.


sound SHD 10

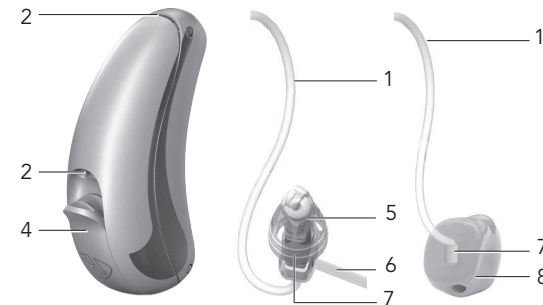

sound SHD S312

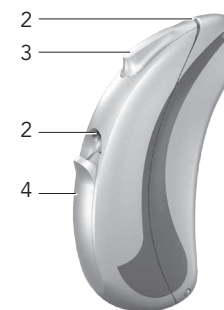

sound SHD S13

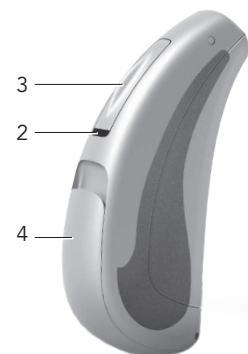

- 1 **Slangetje** – verbindt de oordopjes met het gehoorsysteem
- 2 **Microfoon / microfoonbescherming**
- 3 **Drukknop** – voor programmakeuze en/of volumeveranderingen (naar individuele aanpassing)
- 4 **Batterijlade**
- 5 **Dome (Olive)**
- 6 **Fixatiedeel** – voorkomt dat de dome en het slangetje uit de gehoorgang glijden
- 7 **Externe oordopjes**
- 8 **Oorstukje**

Markering aan zijkant:

Rood = rechts Blauw = links

Optie: afstandsbediening

- De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke gebruikershandleiding beschreven.

| Hoortoestel: | FCC ID: |
|----------------|-----------|
| sound SHD 10 | VMY-UWNB5 |
| sound SHD S312 | VMY-UWNB2 |
| sound SHD S13 | VMY-UWNB1 |

Conform de richtlijn
93/42/EWG voor medi-
sche producten



0124

Plaatsen en vervangen van de batterij.

Batterijtype: **Waarschuwingssignaal voor batterij**

10

312


13

Uw gehoorsysteem laat twee lange tonen horen wanneer de batterij bijna leeg is. Nadat het waarschuwingssignaal voor het eerst geklonken heeft, neemt de geluidskwaliteit van het gehoorsysteem mogelijk af. Dat is geen defect. U kunt het probleem verhelpen door een nieuwe batterij te plaatsen. Uw audicien kan de toonhoogte en het volume van het waarschuwingssignaal naar wens aanpassen. Desgewenst kan het ook uitgeschakeld worden.

- Open de batterijlade.



- Leg de batterij zo in de geopende lade dat de **min-pool** in het vak naar binnen wijst.

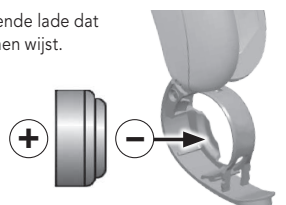

- Sluit de batterijlade.



- **Bij een nieuwe batterij kan het enkele minuten duren voordat deze haar volle capaciteit heeft. Klap pas dan de batterijlade dicht.**

Uw hoortoestel aan/uit zetten.

Met batterijlade

1. Aan:

- Sluit de batterijlade volledig.

Opmerking: Wanneer de inschakelvertraging geactiveerd is, schakelt u uw gehoorsysteem pas 5 seconden na het sluiten van de batterijlade in. Uw audicien kan de inschakelvertraging naar behoefte programmeren.

2. Uit:

- Open de batterijlade gedeeltelijk.

3. Openen:


- Open het batterijklepje volledig om de batterij te vervangen.

Opmerking: Om het gehoorsysteem bij het oor in of uit te schakelen, houdt u het apparaat tussen duim en wijsvinger vast. U opent of sluit de batterijlade met de wijsvinger van uw andere hand.

Bedieningselement.

Zonder bedieningselement

Met drukknop

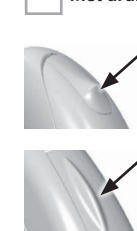

Programmawisseling

Volumeregeling: rechter/linker apparaat – harder

Volumeregeling: rechter/linker apparaat – zachter

Volumeregeling: rechter apparaat – harder, linker apparaat – zachter

Combi: Programmawisseling – rechter apparaat en Volumeregeling – linker apparaat

Combi: Volumeregeling – rechter apparaat en Programmawisseling – linker apparaat

Met afstandsbediening

- De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke gebruikershandleiding beschreven.

Instellen van de geluidsterkte.

Met drukknop

Wanneer de drukknop geprogrammeerd is voor de volumeregeling: Druk op de drukknop op het rechter gehoorsysteem om het volume in beide gehoorsystemen te verhogen. Druk op de drukknop op het linker gehoorsysteem om het volume in beide gehoorsystemen te verlagen. Bij verandering van het volume laten uw gehoorsystemen verschillende signaaltönen horen.

Met afstandsbediening

- De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke gebruikershandleiding beschreven.

| Volume-instelling | Signaaltonen |
|-----------------------------|--------------|
| Voorstel voor volumenniveau | 1 toon |
| Volume verhogen | 1 toon |
| Volume verhogen | 2 tonen |
| Volume verhogen | 2 tonen |
| Minimaal volumenniveau | 2 tonen |

Het hoorprogramma wisselen.

Met drukknop

- Met de programma drukknop kunt u kiezen tussen de luisterprogramma's.
- Bij het omschakelen geeft het hoorsysteem met signaaltönen aan welk programma u hebt geselecteerd.
- Op deze manier kunt u uw apparaat aan elke hoorsituatie aanpassen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Programma 1 (bijv. autoprogramma) | 1 toon |
| Programma 2 (bijv. spraak in lawaai) | 2 tonen |
| Programma 3 (bijv. PhoneConnect) | 3 tonen |
| Programma 4 (bv. muziek) | 4 tonen |
| PhoneConnect | 4 tonen |

Wireless Synchronisation (indien geactiveerd)
In het andere gehoorsysteem klinkt dezelfde toon als in het gehoorsysteem dat ingesteld is

Met afstandsbediening

- De functies van de afstandsbediening zijn in een afzonderlijke gebruikershandleiding beschreven.

Hoorprogramma / Beschrijving van het hoorprogramma

1

2

3

4

Optionele functies.

Wireless Synchronisation (BiLink)

- Met wireless Synchronisation kunnen uw gehoorsystemen draadloos met elkaar communiceren. Telkens wanneer u een programma of het volume van een gehoorsysteem verandert, wordt deze verandering op dezelfde wijze in het andere gehoorsysteem toegepast.
- Alle vragen met betrekking tot uw gehoorsystemen dient u voor te leggen aan uw audicien.

Binaurale telefonie (BiPhone)

Met de binaurale telefoonfunctie kunt u een telefoon aan één oor houden en het geluid duidelijk in beide oren horen. Hiervoor zijn geen accessoires nodig.

Inschakelvertraging

- zorgt ervoor dat u het hoortoestel kunt inschakelen met een automatische vertraging van 5, 10 of 15 seconden om feedback (fluiten) te voorkomen.

Telefoonspool

De telefoonspool maakt een inductieve signaalopname (bijvoorbeeld tijdens het telefoneren) mogelijk. De geluidsoopname via de microfoon wordt gereduceerd en/of onderdrukt.



Tinnitus Manager

Wanneer uw audicien een Tinnitus Manager-programma en de volumeregeling geconfigureerd heeft, kunt u het volume van de Tinnitus Manager instellen wanneer uw gehoorsystemen dit Tinnitus Manager-programma gebruiken.

Aanwijzingen voor verzorging.

Voor het reinigen van uw gehoorapparaat raden we onze HADEO-verzorgingsproducten aan, die speciaal voor uw gehoorapparaat zijn ontwikkeld. De HADEO-producten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij uw hoortoestel specialist.

- Maak het hoortoestel regelmatig schoon om schade aan het hoortoestel te voorkomen en gezondheidsproblemen te vermijden.

- Het gehoorsysteem zelf, het slangetje, het oordopje en de dome of het oorstukje mogen nooit worden afgespoeld of in water worden ondergedompeld, omdat waterdruppels het geluid blokkeren of de elektronische onderdelen van het gehoorsysteem kunnen beschadigen. Maak uw hoorapparaat met een zacht doekje schoon.

- Het hoortoestel moet droog blijven. Mocht het toestel zeer vochtig zijn kunt u het 's nachts in een HADEO-DryBox, HADEO-DryBag of HADEO-droogzak leggen om de vochtigheid uit het toestel te laten trekken.



Externe oordopjes

- Gebruik de oordopjes en dome/orostukje alleen volgens de beschrijving in "Algemene waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften".
- Reinig de dome en het ontvanger-orostukje direct nadat u het hoortoestel uitneemt. Hierdoor kan cerumen niet opdrogen en hard worden.
- Verwijder cerumen met een zacht doekje. Maak indien nodig het doekje nat met een cerumenoplosser.
- Domes moeten elke 3-6 maanden worden vervangen door uw audicien, wanneer ze stijf en bros worden of verkleuren.

De volledige functionaliteit van domes en ontvanger-orostukjes wordt alleen gegarandeerd bij een werkend cerumenfilter.

- Probeer het ontvanger-orostukje niet zelf uit elkaar te halen. Vraag uw audicien om hulp wanneer het ontvanger-orostukje uitgebreid gereinigd moet worden.

Dome en Ontvanger-orostukje kunnen bij onjuiste bediening licht beschadigd raken. Voorkom dat het slangetje verdraaid of bekneld raakt wanneer u uw gehoorsystemen in het etui legt.

Accessoires.

Afstandsbediening RCV2

Dankzij de wireless-functie van uw hoorsystemen kunt u met een afstandsbediening van programma wisselen en het volume wijzigen. Meer informatie krijgt u van uw hoortoestel specialist of vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.



uDirect 3, uStream, uTV3

uDirect3, uStream en uTV3 zijn optionele accessoires voor uw gehoorsystemen. Informatie over het gebruik van uDirect3, uStream of uTV3 staat in de desbetreffende gebruikershandleiding. Neem contact op met uw audicien wanneer u interesse hebt in een streamer of uTV3.

PhoneConnect

Uw audicien heeft eventueel een telefoonprogramma geconfigureerd, dat u via de automatische programmawisseling (PhoneConnect) kunt gebruiken. De magneet in de telefoon zorgt voor het vereiste magnetische veld voor de activering van het telefoonprogramma.

Uw audicien kan u uw individuele gebruiksaanwijzing geven.

Wend u zich met alle vragen in verband met uw hoortoestel tot de audicien.

Probleemoplossing.

Moeilijkheden die zich voordoen, kunnen doorgaans snel aan de hand van de onderstaande aanwijzingen worden verholpen. Als u het probleem met behulp van deze suggesties niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw hoortoestel specialist.

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossingen

| | | |
|------------|--|---|
| Geen toon. | Toestel niet ingeschakeld. Batterij zwak/leeg. Batterijcontact ontorekend. Batterij verkeerd om geplaatst. Oorstukje/minislangetje/domes verstopt met oorsmeer. Verstopte microfoonbescherming. | Schakel het toestel in. Batterij vervangen. Neem contact op met uw audicien. Plaats de batterij met de pluszijde (+) naar boven. Oorstukje/minislangetje/dome reinigen. Neem contact op met uw audicien. |
|------------|--|---|

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Te lage volume-instelling. | Volumeregeling te zacht ingesteld. | Verhoog het volume; voor apparaten zonder volumeregeling neemt u contact op met uw audicien. Doe dat ook wanneer het probleem blijft bestaan. Batterij vervangen. Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen. |
| | Batterij zwak. Oorstukje/minislangetje/dome niet goed geplaatst. Toename van het gehoorverlies. Oorstukjes/minislangetje/domes verstopt met oorsmeer. Verstopte microfoonbescherming. | Neem contact op met uw audicien. Oorstukje/minislangetje/dome reinigen. Neem contact op met uw audicien. |

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossingen

| | | |
|--|--|---|
| Onderbrekingen, apparaat gaat uit. | Vervuild batterijcontact. Batterij zwak. | Neem contact op met uw audicien. Batterij vervangen. |
| Twee lange tonen. | Batterij zwak. | Batterij vervangen. |
| Fluitend geluid. | Oorstukje/minislangetje/dome niet goed geplaatst. Hand of kleding in nabijheid van oor. Slecht passende oorstukjes/Slim tubes/domes. | Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen. Verwijder de hand/kleding bij het oor. Neem contact op met uw audicien. |
| Onduidelijk, vervormd geluid. | Oorstukje/minislangetje/dome niet goed geplaatst. Batterij zwak. Verstopte microfoonbescherming. | Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen. Batterij vervangen. Neem contact op met uw audicien. |
| Oorstukje, minislangetje of dome glijdt uit het oor. | Slecht passende oorstukjes/Slim tubes/domes. Oorstukje/minislangetje/dome niet goed geplaatst. | Neem contact op met uw audicien. Verwijderen en zorgvuldig opnieuw plaatsen. |
| Bij telefoneren te zacht. | Telefoon niet goed gepositioneerd. Gehoorsysteem moet opnieuw geprogrammeerd worden. | Beweeg de telefoonhoorn wat omhoog en omlaag totdat u de positie met de beste overdracht gevonden hebt. Neem contact op met uw audicien. |



sound SHD

Gebruiksaanwijzing

Zie ook "General Warnings and Safety Instructions", Pagina 20-28